

هدف: کیت های یکبار مصرف وصل و جداسازی فیستولا برای مراقبت بهتر از دسترسی عروقی در زمان وصل و جداسازی بیمار همودیالیزی کاربرد دارد. بسته بندی کیت به صورت دو نیم ست جداگانه وصل و جداسازی بوده که از یک سمت به هم متصل می باشند.

مدل: کیت وصل و جداسازی فیستولا همودیالیز (Fistula Kit) دستورالعمل استفاده:

نیم ست وصل فیستولا:

- ۱- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.
- ۲- کیت را در محلی صاف و مسطح به گونه ای قرار دهید تا نیم ست وصل (با شماره ۱ روی لیبل مشخص شده است) بالا قرار گیرد.
- ۳- بسته بندی کیت را از سمت نیم ست وصل به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.
- ۴- بند سبز رنگ دور نیم ست را باز کنید و اقلام مصرفی را مطابق با توضیحات ذیل استفاده نمایید.
- ۵- دستکش ها را بپوشید.
- ۶- دروشیت را به نحوی که لایه جاذب بالا و لایه ضد آب پایین باشد، زیر دست بیمار قرار دهید.
- ۷- از پد الکلی برای ضد عفونی کردن محل دسترسی عروقی استفاده کنید.
- ۸- از چسب ها برای ثابت کردن دروشیت، سوزن های فیستولا و ست همودیالیز استفاده کنید.
- ۹- از سرنگ ۲،۵ سی سی در صورت نیاز برای کشیدن و تزریق هپارین استفاده کنید.
- ۱۰- زباله های باقیمانده را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی در سطل های زباله بیاندازید.

نیم ست جداسازی فیستولا:

- ۱- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.
- ۲- بسته بندی نیم ست جداسازی را به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.
- ۳- بند قرمز رنگ دور نیم ست را باز کنید، اقلام مصرفی را مطابق با توضیحات ذیل استفاده نمایید.
- ۴- دستکش ها را بپوشید.
- ۵- از مقدار کافی پد استریل برای بندآوردن خون بعد از کشیدن سوزن های فیستولا استفاده کنید.
- ۶- بعد از بند آمدن خون محل دسترسی، از پد استریل برای پانسمان و از چسب برای ثابت کردن آن استفاده کنید.

نکته: در صورتی که کیت خریداری شده از مدل های دارای پانسمان نقره باشد، از آن برای پانسمان محل دسترسی به جای چسب و پد استریل استفاده نمایید.

موارد منع مصرف:

برخی اقلام این محصول استریل شده با گاز اتیلن اکساید است و برای بیمارانی که به ETO حساسیت دارند توصیه نمی شوند.

احتیاط:

- ۱- در صورت پاره شدن، صدمه دیدن یا خیس شدن بسته بندی کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.
- ۲- در صورت اتمام تاریخ انقضاء کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.

شرایط نگهداری:

در محیطی خشک و دارای تهویه مناسب، به دور از نور خورشید و دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD07	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	1 of 4

هشدار:

- ۱- شرکت مدوی طب پویان در قبال پیامدهایی که ممکن است بعد از تحویل کالا برای محصول پیش آید، مانند حمل و نقل، انبارش و نگهداری و همچنین استفاده از محصول در شرایطی غیر از شرایط ذکر شده در این دفترچه راهنما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- ۲- تاریخ انقضاء در مورد محصولاتی که به درستی نگهداری شده کاربرد دارد.
- ۳- بلافاصله پس از استفاده به روش مناسب (زیاله های بیمارستانی و بر اساس مقررات بهداشت محیط) دور انداخته شود.
- ۴- این محصول برای هدفی غیر از همودیالیز کاربرد ندارد.

علائم:

	نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد		تاریخ انقضاء
	یکبار مصرف		آدرس تولید کننده
	احتیاط		قبل از استفاده به دستور العمل مراجعه شود
	لات نامبر		چنانچه بسته بندی آسیب دیده از مصرف خودداری کنید

آدرس سازنده:

مدوی طب پویان

آدرس: تهران، سعادت آباد، پایین تر از میدان کاج، نبش کوچه میرزایی، پلاک ۴۴ طبقه اول

آدرس کارخانه: شهرک صنعتی اشتهاارد، بلوار حسابی غربی، بوستان دوم

تلفن: ۰۲۱۲۲۰۷۴۰۰۱

وبسایت: www.medwayteb.com

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD07	R03	1400/10/01 (22/Dec/2021)	2 of 4

ترتیب استفاده از اقلام کیت

CONNECTION Set


کیت وصل-فیستولا Fistula KIT

۱



دستکش معاینه پزشکی
۱ جفت

۲

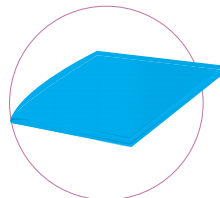


دروشیت
۱ عدد

۳




پد الکلی
۲ عدد

۴

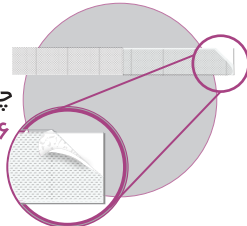

چسب حصیری ۳×۱۰
۶ عدد


۵

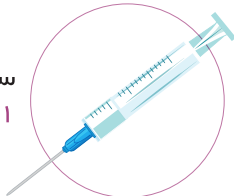

سرنگ ۲.۵ سی سی
۱ عدد

DISCONNECTION Set

کیت جداسازی-فیستولا Fistula KIT

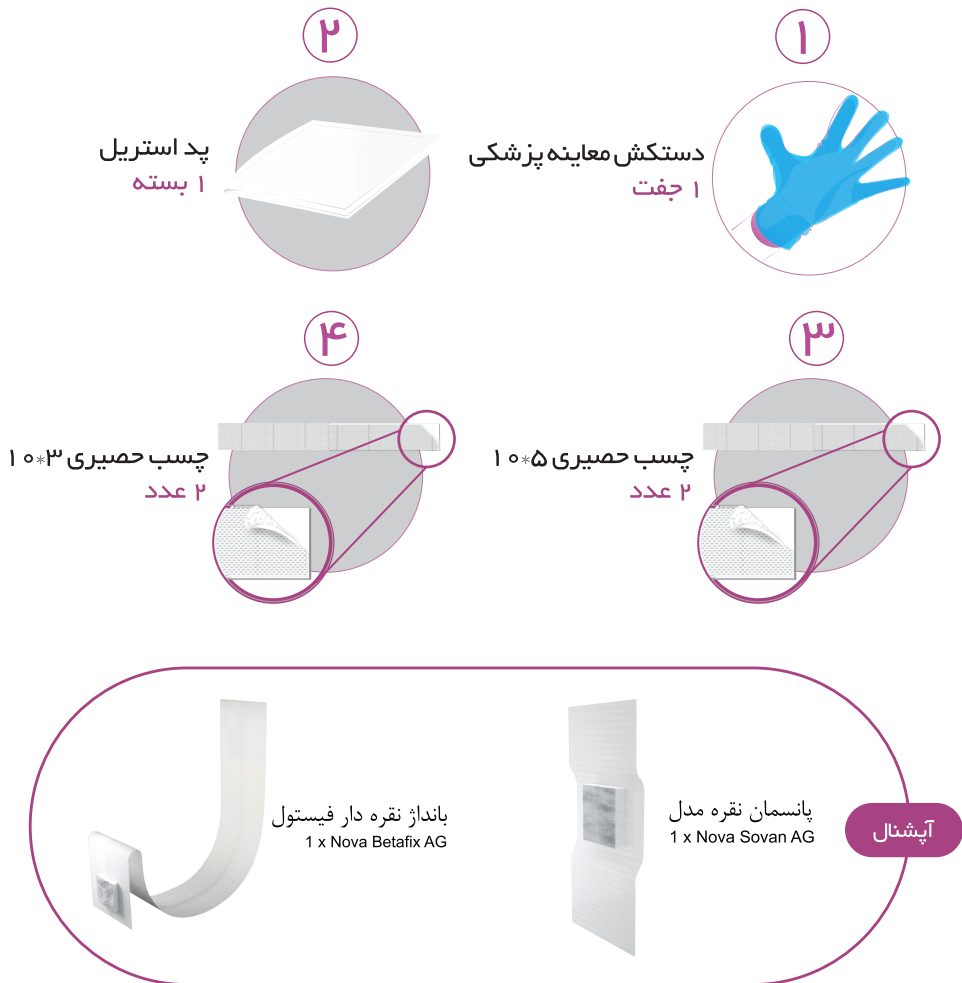

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD07	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	4 of 4