

درمانی، برای تخلیه مایع داخل هر یک از لوله های کنتر استفاده کنید.

۱۱- بیمار را طبق دستورالعمل همودیالیز به دستگاه وصل کنید.

۱۲- زباله های باقیمانده را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی در سطل های زباله بیاندازید.

نیم ست جداسازی کنتر:

۱- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.

۲- بسته بندی نیم ست جداسازی را به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.

۳- بند قرمز رنگ دور نیم ست را باز کنید و اقلام مصرفی به ترتیبی که در هر کیت چیده شده، و با توجه به توضیحات ذیل استفاده شوند.

۴- دستکش ها را بپوشید.

۵- با سرنگ ۱۰ سی سی، شستشوی هر یک از لوله های کنتر را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام دهید.

۶- از سرنگ ۲،۵ سی سی برای کشیدن و تزریق هپارین به داخل هریک از لوله های کنتر استفاده کنید

۷- از پد الکلی برای ضدعفونی هاب هر یک از لوله های شریانی و وریدی به صورت جدا از هم و به شکل دورانی استفاده کنید.

نکته: در صورتی که کیت خریداری شده از مدل های دارای پد نقره باشد، از آن برای پد محل دسترسی استفاده نمایید و با چسب فیکس کنید.

۸- از هپارین لاک برای پوشاندن انتهای محل اتصال کنتر استفاده کنید.

۹- زباله های باقیمانده را مطابق دستورالعمل مرکز درمانی در سطل های زباله بیاندازید.

هدف: کیت های یکبار مصرف وصل و جداسازی کنتر برای مراقبت بهتر از دسترسی عروقی در زمان وصل و جداسازی بیمار همودیالیزی کاربرد دارد. بسته بندی کیت به صورت دو نیم ست جداگانه وصل و جداسازی بوده که از یک سمت به هم متصل می باشند.

مدل: کیت وصل و جداسازی کنتر همودیالیز (Catheter Kit)

دستورالعمل استفاده:

نیم ست وصل کنتر:

۱- ابتدا شستشوی دست مطابق دستورالعمل مرکز درمانی انجام شود.

۲- کیت را در محلی صاف و مسطح به گونه ای قرار دهید تا نیم ست وصل (با شماره ۱ روی لیبل مشخص شده است) سمت بالا قرار گیرد.

۳- بسته بندی کیت را از سمت نیم ست وصل به آرامی باز کنید. مراقب باشید اقلام داخل کیت به خارج از بسته پراکنده نشود.

۴- بند سبز رنگ دور نیم ست را باز کنید و اقلام مصرفی را مطابق توضیحات ذیل استفاده نمایید.

۵- دستکش ها را بپوشید.

۶- بسته بندی شان پرفور را باز کرده و زیر کنتر به نحوی که لایه جاذب بالا و لایه ضد آب پایین باشد، قرار دهید.

۷- شان پرفور را با چسب های حصیری بر روی بدن بیمار ثابت کنید.

۸- از پد الکلی برای ضدعفونی هاب هریک از لوله های شریانی و وریدی به صورت جدا از هم و به شکل دورانی استفاده کنید.

۹- از سرنگ ۲،۵ سی سی در صورت نیاز برای کشیدن و تزریق هپارین استفاده کنید.

۱۰- از سرنگ ۵ سی سی با توجه به دستورالعمل مرکز

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD22	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	1 of 4

هشدار:

- ۱- شرکت مدوی طب پویان در قبال پیامدهایی که ممکن است بعد از تحویل کالا برای محصول پیش آید، مانند حمل و نقل، انبارش و نگهداری و همچنین استفاده از محصول در شرایطی غیر از شرایط ذکر شده در این دفترچه راهنما هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
- ۲- تاریخ انقضاء در مورد محصولاتی که به درستی نگهداری شده کاربرد دارد.
- ۳- بلافاصله پس از استفاده به روش مناسب (زباله های بیمارستانی و بر اساس مقررات بهداشت محیط) دور انداخته شود.
- ۴- این محصول برای هدفی غیر از همودیالیز کاربرد ندارد.

موارد منع مصرف:

برخی اقلام این محصول استریل شده با گاز اتیلن اکساید است و برای بیمارانی که به ETO حساسیت دارند توصیه نمی شوند.

احتیاط:

- ۱- در صورت پاره شدن، صدمه دیدن یا خیس شدن بسته بندی کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.
- ۲- در صورت اتمام تاریخ انقضاء کیت ها و یا هر کدام از اقلام موجود در آن ها، از آن استفاده نشود.

شرایط نگهداری:

در محیطی خشک و دارای تهویه مناسب، به دور از نور خورشید و دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

علائم:

	نگهداری در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد		تاریخ انقضاء
	یکبار مصرف		آدرس تولید کننده
	احتیاط		قبل از استفاده به دستورالعمل مراجعه شود
	لات نامبر		چنانچه بسته بندی آسیب دیده از مصرف خودداری کنید

آدرس سازنده:

مدوی طب پویان

آدرس: تهران، سعادت آباد، پایین تر از میدان کاج، نبش کوچه میرزایی، پلاک ۴۴ طبقه اول
 آدرس کارخانه: شهرک صنعتی اشتهاارد، بلوار حسابی غربی، بوستان دوم
 تلفن: ۰۲۱۲۲۰۷۴۰۰۱

وبسایت: www.medwayteb.com

Doc. Code	Rev. No.:	Date of Issue	Page
F72300RD22	R03	1400/10/01 (22/Dec./2021)	2 of 4


ترتیب استفاده از اقلام کیت :

CONNECTION Set

کیت وصل-کنتر Catheter KIT

۲

شان پرفوره
عدد ۱

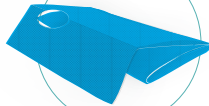


۱

دستکش معاینه پزشکی
۱ جفت



۴

چسب حبیری ۳×۱۰
عدد ۲

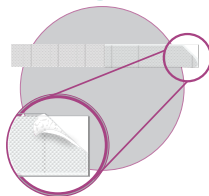

۳

پد الکلی
عدد ۲



۶

سرنگ ۵ سی سی
عدد ۲




۵

سرنگ ۲.۵ سی سی
عدد ۱



DISCONNECTION Set

کیت جداسازی-کنتر Catheter KIT

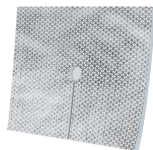

پد نقره
1 x Exit Pad AG

آپشنال